

Update Beschreibung

Das Service Pack CEREC SW 4.3.1 aktualisiert bestehende CEREC SW 4.3.0 Installationen. Das Service Pack beinhaltet die folgenden Änderungen und Fehlerbehebungen:

Änderungen

- Die Dateigröße von *.ssi Dateien wurde reduziert, um den Import in die Sirona Galaxis Software zu erleichtern.
- Omnicam Modelle werden im 3D PDF nun farbig dargestellt. Falls verfügbar, kann das SmileDesign Gesicht im 3D PDF ebenfalls angezeigt werden.
- Der Restaurationsboden ist nun auch bei dunklen Farbverläufen immer hell, um den Kontrast mit dem Modell zu verstärken.
- Farbverlauf kann über den Regler im Menü Analysewerkzeuge auch ausgeschaltet werden.
- Der Farbverlauf für einige Restaurationsmaterialien wurde aktiviert (anstatt alter grauer Darstellung)
- Zu kleine Blöckgrößen für die designte Restauration werden im Schritt „Blockgröße ändern“ nicht mehr ausgeblendet, sondern mit einem Hinweis versehen.
- Standardbezeichnung beim Export von Dateien wurde geändert. (YYYY-MM-DD_Indikation Zahnnummer_Zahnschema.xyz;
z.B. 2014-08-07_I45_C36_V43_C11_C22_C25_I16_C24_FDI.rst)
- Sirona inCoris TZI C wurde als neues Material integriert.
- Ivoclar TelioCAD meso wurde als neues Material für Abutments integriert.
- Ivoclar Empress CAD und Empress CAD multi sind als Verblendstruktur für Abutments freigeschaltet.

Fehlerbehebungen

- Fehler, die unter Umständen beim Benutzen des Tools Incisal Variation aufgetreten sind, wurden behoben.
- Das Entstehen von Artefakten beim Benutzen des Shape Tools wurde behoben.
- Der Effekt, dass unter Umständen die Funktion „Nachbar ausblenden“ in den entsprechenden Werkzeugen nicht verfügbar war, wurde gefixt.
- Bezüglich des virtuellen Artikulators wurden kleinere Fehler behoben und die Berechnung beschleunigt.
- Fehler im Kalibrationsprozess der Omnicam wurden behoben.
- Fehler, die dazu führten, dass der Connect Button nicht mehr verfügbar war, wurden behoben.
- Die Präparationslinie für Pontics kann wieder bei gleichzeitig transparent eingblendetem Biocopy Modell editiert werden.
- Im Settling wurden die Bilder der Icons der Buttons Erase & Add ihrem Sinn entsprechend getauscht.
- Man kann nun in der Patientenliste wieder sortieren.

Wir empfehlen allen CEREC SW 4.3 Anwendern das Service Pack zu installieren.