

Update-Beschreibung

Der Servicepack CEREC SW 4.0.2 aktualisiert 4.0 und 4.0.1 Installationen und beinhaltet folgende Änderungen:

- **Vorbereitung für CEREC Guide Daten**
Angepasstes Datenhandling in Vorbereitung auf CEREC Bohrschablonen.
- **Abdruckmaterial als Bissregistrator**
Im Konfigurationsmenü (Optionen) kann ein optionaler Bildkatalog für die Bissregistrierung mittels Abdruckmaterial freigeschaltet werden. Der Katalog steht dann unter „Katalog hinzufügen“ zur Verfügung. Aufnahmen in diesem Katalog werden ignoriert sobald echte Aufnahmen des Gegenkiefers im entsprechenden Katalog vorhanden sind.
- **Sprache umschalten**
Im Konfigurationsmenü (Optionen) kann die Sprache der Benutzeroberfläche umgeschaltet werden. Ein Neustart der Software ist notwendig, um die Änderung zu übernehmen.
- **Materialinformationen bei „Blockgröße ändern“**
Im Schritt „Blockgröße ändern“ der Phase SCHLEIFEN werden Blockhersteller und -Typ angezeigt.
- **Alle Restaurationen in Modellfarbe**
Wird das Analysewerkzeug „Restauration einfärben“ aktiviert, werden auch inaktive Restaurationen entsprechend eingefärbt.
- **Kontaktanzeige auf allen Restaurationen**
Kontaktflächen werden auch auf inaktiven Restaurationen angezeigt.

Eine gültige CEREC SW 4.0.x Installation ist Voraussetzung für dieses Update. Die Aktualisierung 4.0.2 wird empfohlen für alle 4.0 und 4.0.1 Anwender.