

Update Beschreibung

Das Service Pack CEREC SW 4.2.1 aktualisiert die CEREC SW 4.2 und unterstützt sowohl die CEREC Omnicam als auch die CEREC Bluecam. Das Service Pack beinhaltet die folgenden Änderungen:

- **Reparatur eventuell abgemeldeter BlueCam Treiber**
In einigen Fällen kam es dazu, dass nach der Installation der Software die Treibereinstellung für Bluecam und inEos Blue so verändert war, dass eine Aufnahme nicht mehr möglich war. (Die Software meldet dabei, dass die Kamera anderweitig verwendet wird.) Dies tritt nach Installation des Service Packs nicht mehr auf bzw. wird automatisch repariert.
- **Komplikationen durch eine von den Werkseinstellungen abweichende Einstellung der Benutzerkontensteuerung werden vermieden.**
Eine veränderte Einstellung der Benutzerkontensteuerung unter Windows führt nicht mehr zu Komplikationen wie nicht erkannte Kamera oder Schleifeinheit, Fehler beim Export oder Import von Dateien etc. Die Stufe der Benutzerkontensteuerung unter 4.2.1 wird nach Installation des Service Packs 4.2.1 frei wählbar.
- **Meldung falls mindestens ein Lizenzstick ohne aktuelle Firmware angeschlossen ist**
Es werden automatisch alle angeschlossenen Lizenzsticks auf den Stand ihrer Firmware überprüft. Es erfolgt eine Aufforderung zur Aktualisierung falls mindestens einer der angeschlossenen Lizenzsticks über keine aktuelle Firmware verfügt.
- **Optimierung des Scanprozesses mit Omnicam**
Durch die Optimierung des Scanprozess läuft dieser nun schneller und toleranter.
- **Absturz bei Spracheinstellung Italienisch und Öffnen von Restaurationsparametern behoben**
- **Selten auftretender Absturzfehler beim Präparationsrandeingabe behoben**
- **Optimierung des Ausblockens Hinterschnitt-lastiger Inlay Präparationen (Omnicam)**

Für die Installation ist eine CEREC SW 4.2 erforderlich.

Wir empfehlen allen CEREC SW 4.2 Anwendern das Service Pack zu installieren.