

# Update Beschreibung

Das Service Pack inLab SW 4.2.1 aktualisiert die inLab SW 4.2 und beinhaltet die folgenden Änderungen:

- **Reparatur eventuell abgemeldeter inEos Blue Treiber**  
In einigen Fällen kam es dazu, dass nach der Installation der Software die Treibereinstellung für den inEos Blue oder die Bluecam so verändert war, dass eine Aufnahme nicht mehr möglich war. (Die Software meldet dabei, dass der Scanner anderweitig verwendet wird.) Dies tritt nach Installation des Service Packs nicht mehr auf bzw. wird automatisch repariert.
- **Komplikationen durch eine von den Werkseinstellungen abweichende Einstellung der Benutzerkontensteuerung werden vermieden.**  
Eine veränderte Einstellung der Benutzerkontensteuerung unter Windows führt nicht mehr zu Komplikationen wie nicht erkannter Scanner oder Schleifeinheit, Fehler beim Export oder Import von Dateien etc. Die Stufe der Benutzerkontensteuerung ist nach Installation des Service Packs 4.2.1 frei wählbar.
- **Meldung falls mindestens ein Lizenzstick ohne aktuelle Firmware angeschlossen ist**  
Es werden automatisch alle angeschlossenen Lizenzsticks auf den Stand ihrer Firmware überprüft. Es erfolgt eine Aufforderung zur Aktualisierung falls mindestens einer der angeschlossenen Lizenzsticks über keine aktuelle Firmware verfügt.
- **Fehler bei Erstvorschlägen des Zwischengliedes behoben**  
In seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass bei Benutzung des Gruppieren-Werkzeugs die Vorschläge für die Zwischenglieder ungünstig waren.
- **Absturz bei Spracheinstellung Italienisch und Öffnen von Restaurationsparametern behoben**
- **Selten auftretender Absturzfehler beim Präparationsrandeingabe behoben**
- **Schwarze Texturen bei Omnicam Connect Fällen entfernt**  
Nach dem Download von Omnicam Connect Fällen in inLab konnten schwarze Texturen auftreten, dieser Fehler ist behoben.
- **Optimierung des Ausblockens Hinterschnitt-lastiger Inlay Präparationen (Omnicaam)**
- **Fehler bei der Modellausrichtung behoben**  
Bei der Ausrichtung der Modells im Schritt Modellachse ausrichten konnte es zu einem Absturz kommen, dieser Fehler wird mit der 4.2.1 behoben.

Für die Installation ist eine inLab SW 4.2 erforderlich.

Wir empfehlen allen inLab SW 4.2 Anwendern das Service Pack zu installieren.